


I den här guiden används en Android telefon och version 4.8.4 av Rogerveice



Börja med att ladda ner Rogerveice.

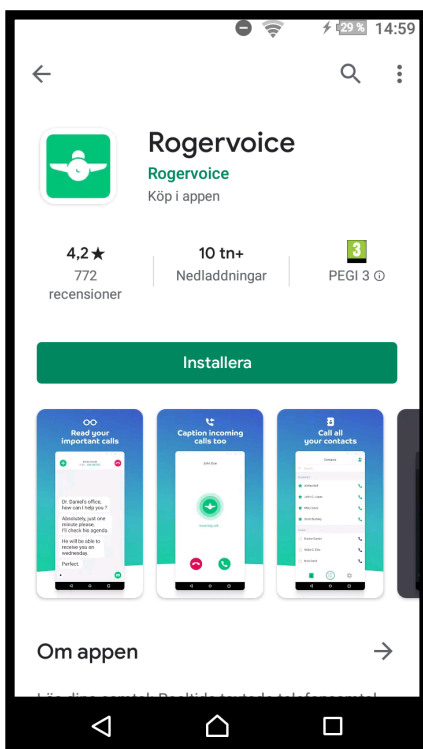

Sök på Rogerveice, när du hittat rätt, tryck på installera.

Rogerveice är tillgängligt på smarta telefoner för både iOS (iPhone) och på Android. Du behöver ha minst iOS 10.3 eller Android version 5.0 för att ladda ner Rogerveice.



Du behöver också vara ansluten till internet. Antingen med WiFi eller med en mobildata uppkoppling t.ex. 4G.


När Rogerveice laddats ner på din smartphone öppnar du appen.

När du öppnar appen första gången kommer du till en bild som ser ut som bilden till höger.

Välj **I HAVE READ AND ACCEPT** för att komma vidare.

När du gör så godkänner du ett avtal mellan dig och Rogerveice

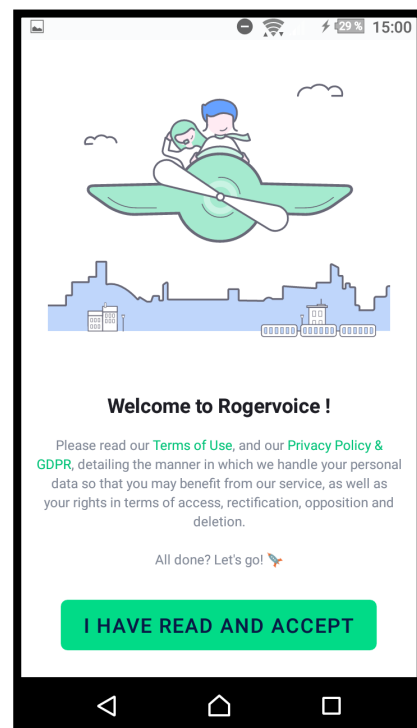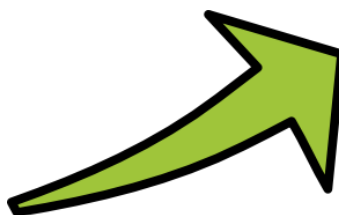

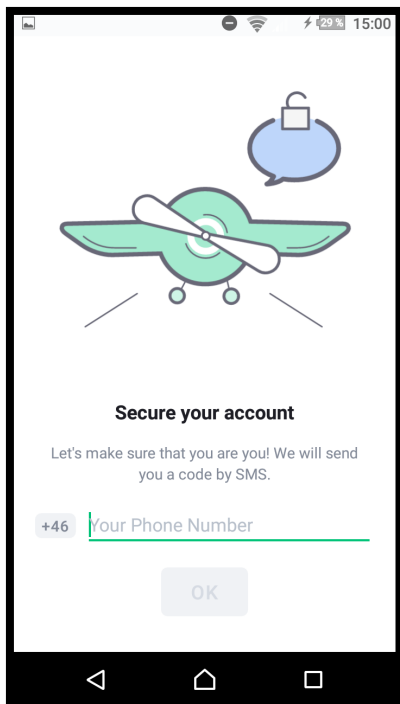

Om det är första gången du använder Rogerveice måste du först skriva in ditt telefonnummer.

**Skriv ditt telefonnummer t.ex. 070 123 45 67**



**Tryck ok**

Av säkerhetsskäl skickar nu Rogerveice ett textmeddelande till detta telefonnummer.

Meddelandet innehåller en verifieringskod som krävs för att ansluta till ditt konto.

Koden ska skrivas in i Rogerveice för att bekräfta att det är du som har tillgång till det telefonnumret.


**Koden i bilden bredvid är ett exempel.**

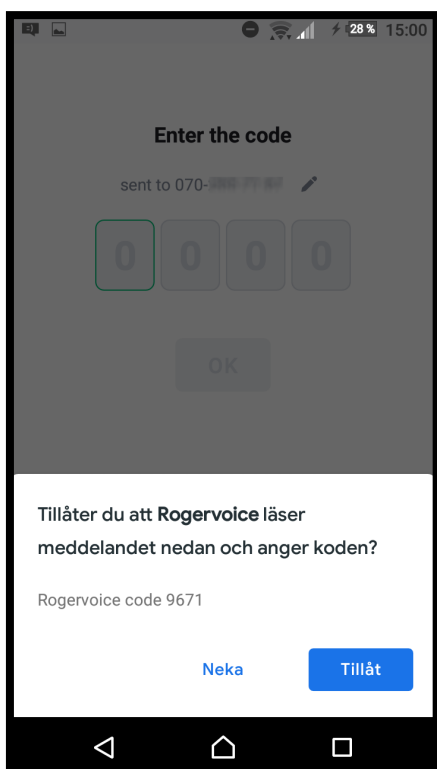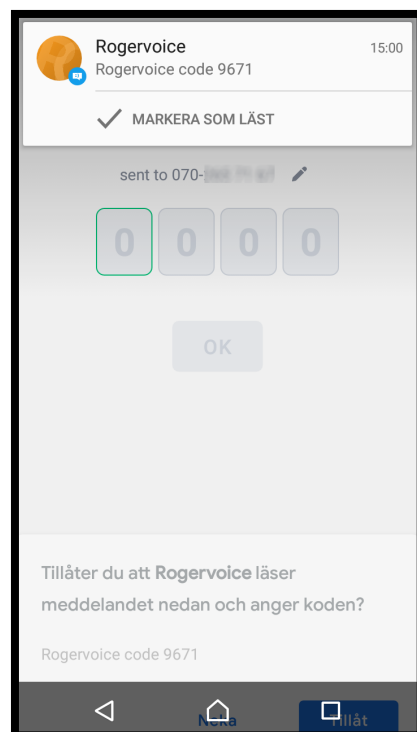

För att underlätta kan du acceptera att Rogerveice själv lägger in koden i appen.

Tryck då bara på **Tillåt** så sköter appen resten.




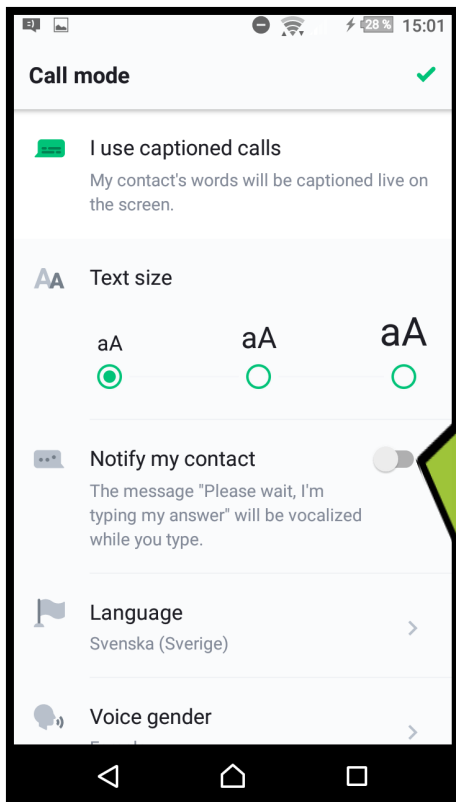


Första gången appen öppnas hamnar man per automatik i inställningar.


Här kan du ändra storleken på texten som kommer till dig när du ringer. **I de flesta fall är det här den enda inställningen du behöver välja.** Det går alltid att ändra vid ett senare tillfälle.

Om du själv inte vill tala utan vill skriva tillbaka kan du slå på denna inställning så kommer en talsyntes meddela motparten att du håller på att skriva ett svar.

Om du trycker på adressboken i vänstra hörnet på Rogerveice så kan du synkronisera dina kontakter i din telefon till Rogerveice.

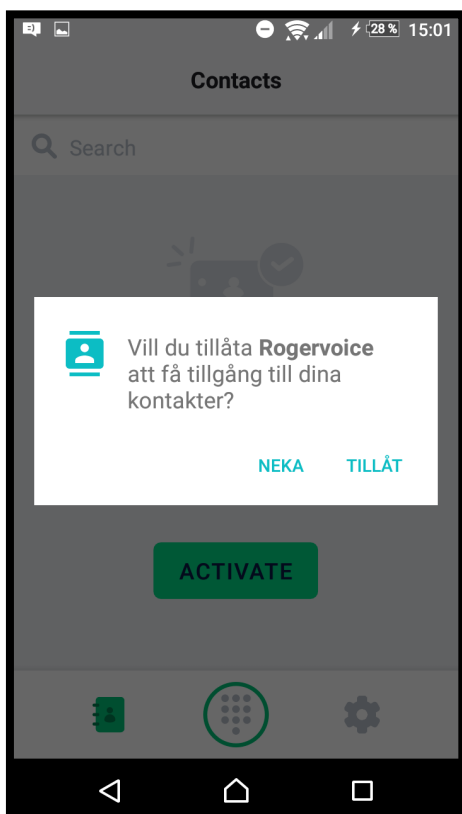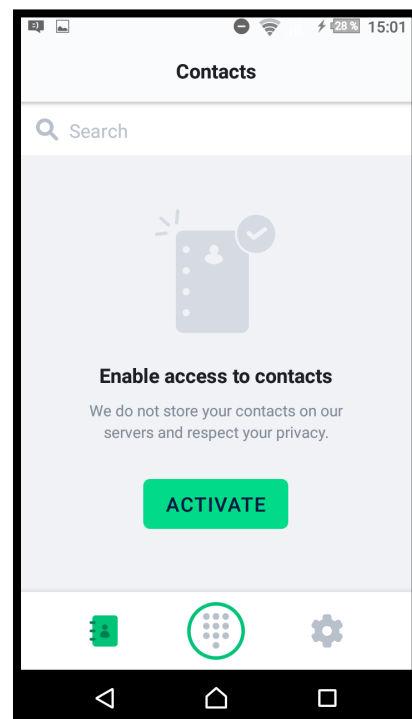

Om du tillåter det kan du trycka **TILLÅT** så får Rogerveice tillgång till dina kontakter.

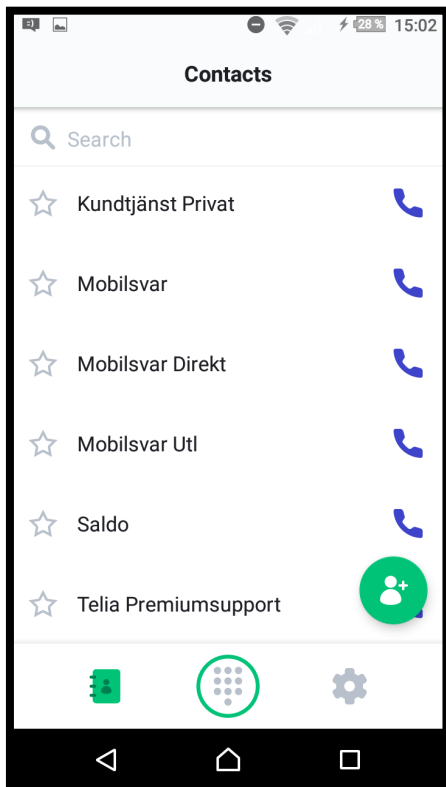



Så här kan det nu se ut i din Rogervoice.

När kontakterna har en blå telefonlur betyder det att det numret inte är registrerat hos Rogervoice. För att ringa ett sådant nummer behöver du ett abonnemang från Rogervoice.

Är det däremot en grön telefonlur så betyder det att det numret har Rogervoice. Då är det gratis att ringa med textade samtal. **Normal samtalstaxa gäller dock ändå.**


**Du kan nu använda Rogervoice för att få textade telefonsamtal.**

Om telefonsymbol är blå när du slagit in det nummer du vill ringa betyder det att numret kräver Rogervoice abonnemang för att fungera med textade samtal.

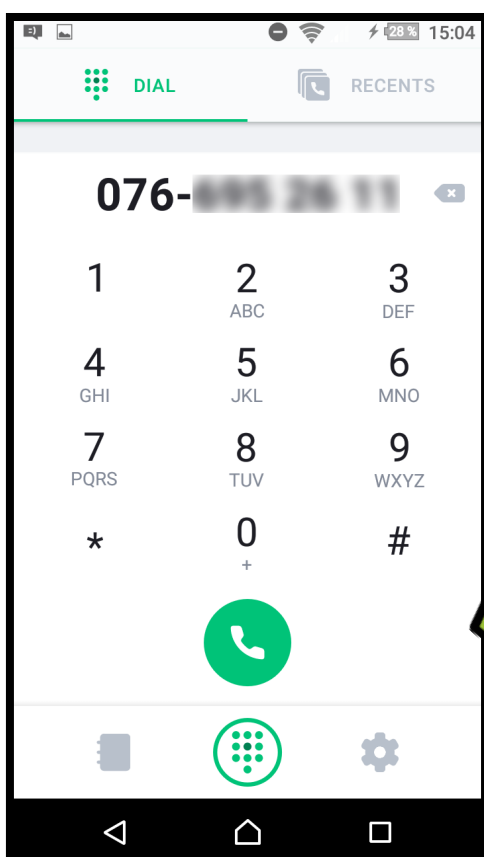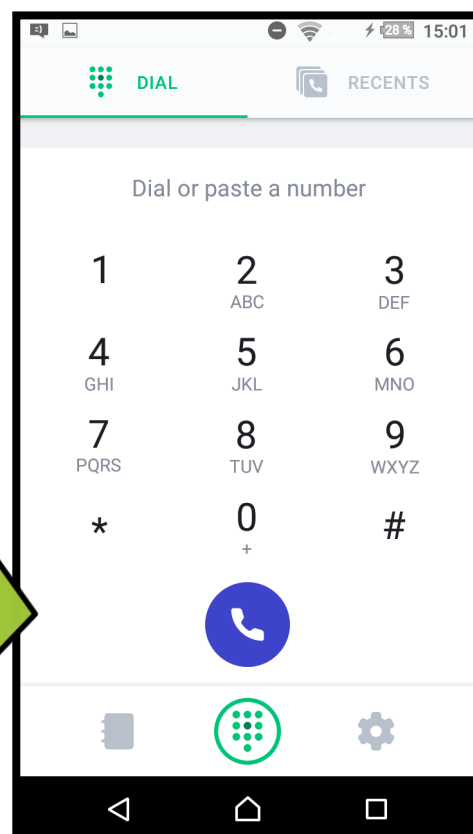

Grön telefonsymbol betyder istället att det telefonnumret har Rogervoice på sin telefon och du kan ringa det med textade samtal även om du **inte** har ett Rogervoice abonnemang.

Be dina vänner och bekanta installera Rogervoice.



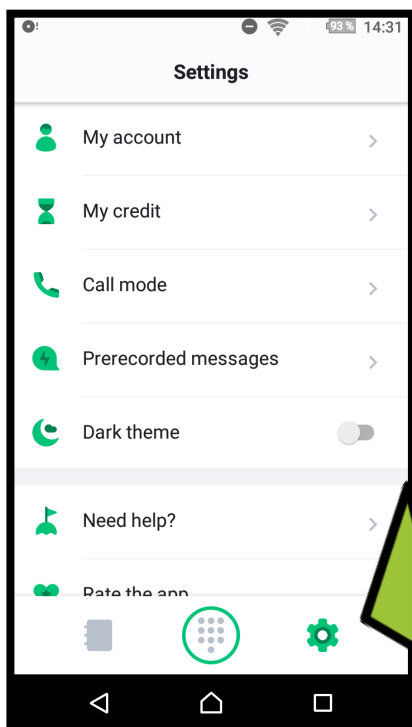


För att köpa ett abonnemang av Rogerveoice gå till inställningar.  
Tryck på kugghjulet längst ner till höger i appen.

Välj sedan **My credit**


Det är alltid gratis att ringa textade samtal mellan två telefoner som har Rogerveoice installerat.

Första gången man installerar Rogerveoice får man 30 min att testringa till någon som inte har appen installerad.

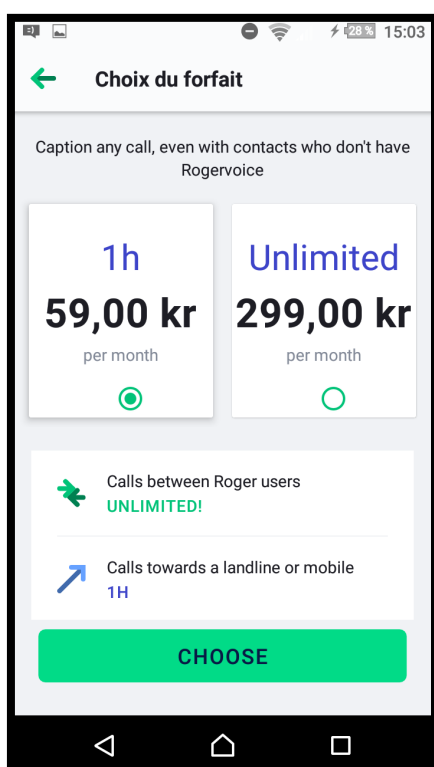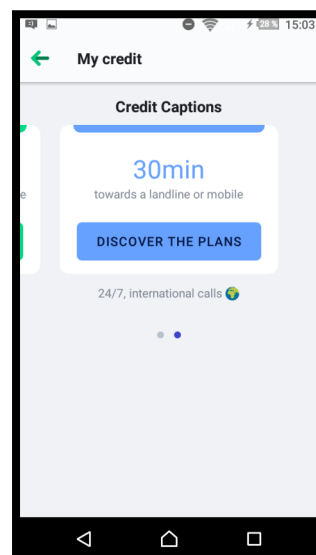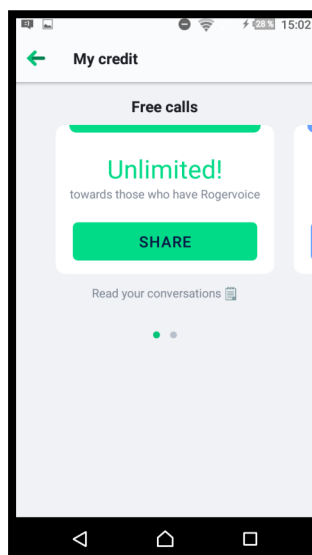

Vill man efter de 30 gratis minuterna fortsatt kunna ringa till vem som helst (**som inte har appen installerad**) med textade samtal behöver man köpa ett abonnemang.

Det gör man direkt i appen.

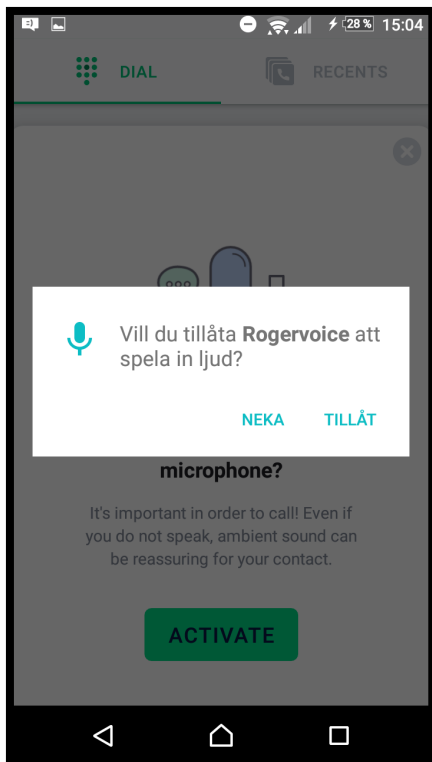

När första samtalen görs via Rogervoice behöver man godkänna att Rogervoice får använda telefonens mikrofon.




Tryck på **TILLÅT**

På bilden till höger är ett samtal med Rogervoice igång.

Rogervoice textar nu både det du säger och det som din samtalspartner säger.

Ibland blir det fel text. Försök se till att det är så tyst runt omkring dig för att det ska fungera bra.

Om du inte förstår vad motparten menar be dom tala tydligt och långsamt. För att Rogervoice lättare ska texta rätt.

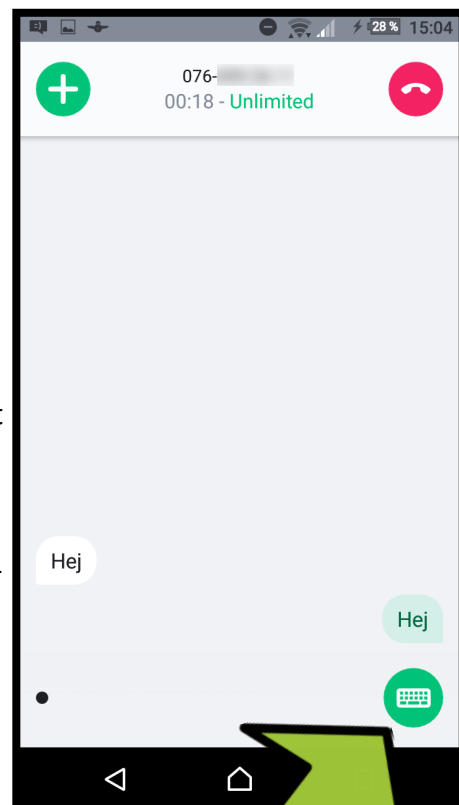



Man kan också använda tangentbordet för att kommunicera med motparten.

Tryck på symbolen för tangentbord.

Skriv ditt meddelande, när du skickar det så kommer en talsyntes tala ut ditt meddelande hos motparten.

I dagsläget finns det bara en kvinnlig röst att välja.

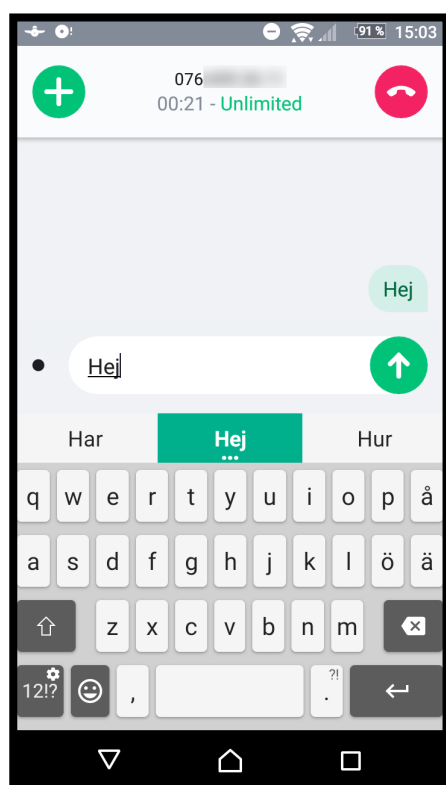

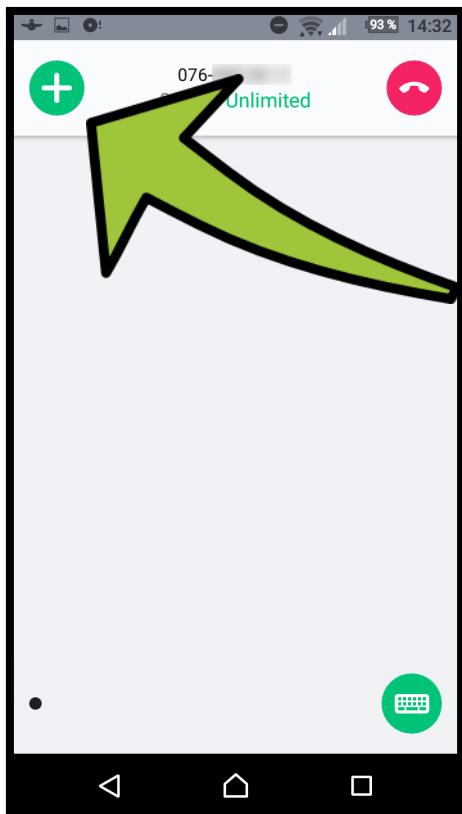


När ett samtal pågår kan man aktivera funktionen högtalare som möjliggör att du hålla din telefon längre ifrån dig för att lättare kunna se vad som textas.

Tryck på plus tecknet i vänstra hörnet när ett samtal är igång.

Du får då fram en meny som syns på bilden till höger.

Tryck på symbolen för högtalaren för aktivera den.

Du kan även byta språk här om du ringer till någon som inte talar svenska. Tryck på den svenska flaggan för att välja ett annat språk.

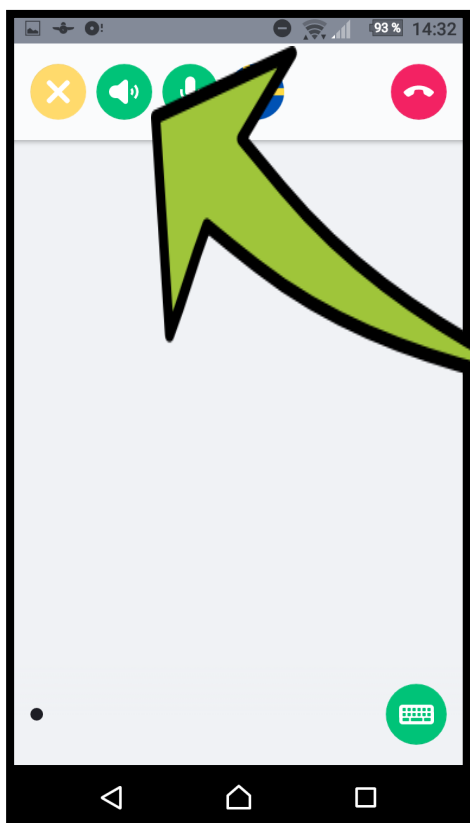


På bilden till vänster har högtalarikonen bytt färg från grå till grön vilket indikerar att det som motparten nu säger hörs i din telefons högtalare.

**OBS du kanske även kan koppla din telefons ljud direkt till ett hörhjälpmedel via Blåtand.**

För att se om detta är möjligt för just dig kan du behöva kontakta din audionom.

**OBS detta gäller bara dig som skaffar ett abonnemang och får ett Rogervoice nummer.**

**Om du endast ringer vänner och bekanta som har Rogervoice installerat på sin telefon är det inte nödvändigt.**

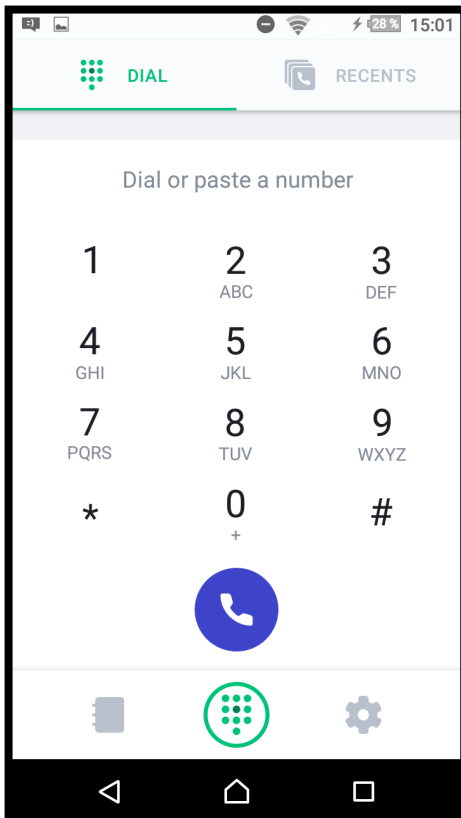

Det finns två sätt att ta emot ett samtal


### **☎ Ring ditt Roger-nummer.**

När du har köpt ett abonnemang så får du ett extra telefonnummer som syns i Rogervoice appen.

I de fall du vill att det ska vara ett textat samtal när någon ringer till dig så lämnar du ut det numret. Då förstår appen att det är ett textat samtal och startar automatiskt när det ringer på just det nummer.

### **+ ☎ Ring ditt mobiloperatörsnummer.**

Om du vill att personer ska ringa dig på ditt mobiloperatörsnummer men ändå svara med Rogervoice och få textade samtal. Då är det enklast att vidarekoppla ditt vanliga telefonnummer till ditt Roger-nummer i din telefon. Det är att rekommendera att du ställer in vidarekoppling eftersom du då bara har ett telefonnummer att hantera.

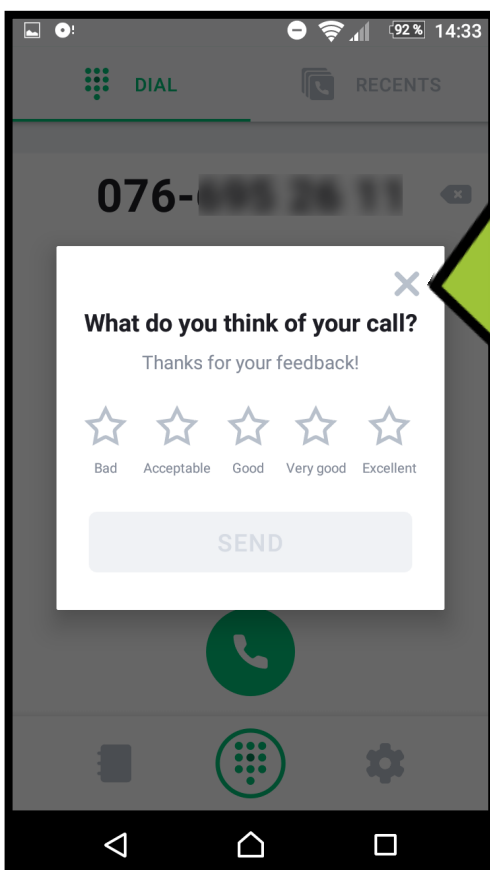

Ibland efter ett samtal kommer denna ruta fram.

Rogervoice vill att du ska bedöma kvaliteten på hur bra eller dåligt samtalet textades.

Välj själv om du vill markera antal stjärnor annars trycker du bara på krysset för att stänga rutan.